



Medida GmbH & Co.KG Sangenweg 19 64589 Stockstadt

Ihr Zeichen/Nachricht vom

Ihr/e AnsprechpartnerIn:

**Manuel Talinski**

Email

Telefon

06158 8785-100

Fax

06158 8785-190

Stockstadt, den 21.04.2016

**Produktinformation zu OXYWAY-Druckminderer der Typen Fast und Click (inkl. Verteilerleisten):  
WM3804/S1, WM31030, WM31030/S1, WM30841, WM31891, WM30891, WM30881, WM33821  
Abweichung des Flowwerts;**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir informieren hiermit darüber, dass die Firma Weinmann Emergency Medical Technology GmbH & Co.KG in Hamburg aufgrund einer technischen Änderung an dem oben genannten Druckminderer Mitte 2015 ein vorzeitiger Verschleiß an diesem eintreten und zur Folge haben kann, dass dies zu einer falschen Dosierung des Inhalationflows führt.

Betroffene Medizinprodukte sind:

- OXYWAY Fast I, II und III des Seriennummernkreises 1506358 bis 1602261
- OXYWAY Click des Seriennummernkreises 1500596 bis 1600243
- Verteilerleisten mit OXYWAY Click des Seriennummernkreises 1500004 bis 160009

**Alle betroffenen Druckminderer müssen durch WEINMANN Emergency Im Zentrum für Produktion, Logistik und Service umgerüstet werden.** Einen Retoureschein können Sie direkt bei uns per Email oder telefonisch anfordern.

Sollten Sie betroffene Produkte haben, können Sie diese laut Weinmann bis zur Umrüstung weiter nutzen. **Testen Sie bitte vor dem weiteren Einsatz, ob ein Flow abgegeben wird! Stellen Sie hierzu den Druckminderer auf Raststufe 5 und 12 ein, ist kein Flowunterschied von Ihnen festgestellt worden, dürfen Sie das Gerät nicht weiter nutzen!**

Weiterführende Informationen finden Sie auf der Internetseite des Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) unter <http://www.bfarm.de> → Über Suche „Weinmann Druckminderer“

Bei Rückfragen erreichen Sie uns direkt unter der Telefonnummer: 06158-8785-100.

Freundliche Grüße

Manuel Talinski  
Geschäftsführer  
medida GmbH & Co.KG